

Toma DIN CM Gases Medicinales




- Unidad terminal que permite el suministro de gases medicinales y vacío mediante conectores DIN selectivos.
- Incorpora tubo de cobre de 10 mm soldado a la base de la toma.
- Diseño sencillo y con una rápida y fácil instalación, tanto para montaje en pared como en cualquier dispositivo médico.
- Doble posición del conector selectivo, reposo y funcionamiento, lo que evita tener que retirarlo si no se va a utilizar.
- Montaje mural, tanto de forma empotrada como en superficie, mediante unca caja de plástico común para todos los gases.
- Incluye cerco embellecedor para montaje empotrado y ocultar las posibles irregularidades del paramento.
- Diseño que cumple la norma ISO 13260-2, con certificado CE como Producto Sanitario Clase IIb.

Composición y Funcionamiento

La toma DIN CM de gases medicinales se compone de un taco soldado a un tramo de tubo de cobre taponado de 10 mm de sección y 150 mm longitud, el cual se conectará a la red de suministro existente. Al taco se fija la válvula de la toma selectiva, la cual permite el paso del fluido gracias a la inserción del conector selectivo, así como de cierre a la desconexión del mismo. La válvula de la toma selectiva está identificada con el símbolo y color identificativo del gas medicinal. Adicionalmente, y en el caso de montaje mural, la toma DIN se fija a la pared gracias a una caja de montaje superficial y empotrada, la cual incluye una tapa frontal y un cerco de 100 x 100 mm en el caso de que sea empotrada para ocultar las irregularidades del paramento.



Dimensiones

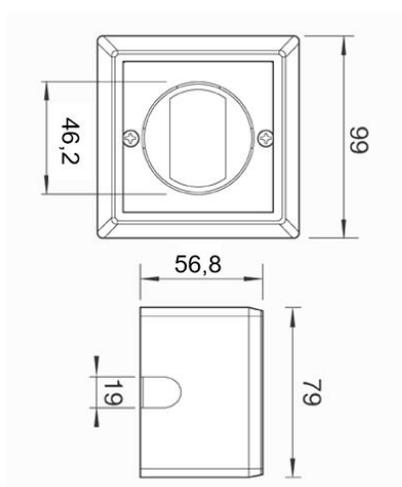

Códigos

Códigos			
186162	Caja mural y Toma DIN CM Oxígeno	186168	Toma DIN CM Oxígeno
186163	Caja mural y Toma DIN CM Protóxido	186169	Toma DIN CM Protóxido
186164	Caja mural y Toma DIN CM Aire	186170	Toma DIN CM Aire
186165	Caja mural y Toma DIN CM Vacío	186171	Toma DIN CM Vacío
186166	Caja mural y Toma DIN CM Carbónico	186172	Toma DIN CM Carbónico
186167	Caja mural y Toma DIN CM Nitrógeno	186173	Toma DIN CM Nitrógeno

www.carbueros.com
tell me more



**CARBUEROS
METALICOS**
Grupo Air Products

Madrid:

T: 902 109 968

F: 916 579 521

hospmad@carbueros.com

Barcelona:

T: 902 109 937

F: 932 902 607

hospbcn@carbueros.com